


CÓMO RECOLECTAR SU HISOPADO RECTAL

Qué necesitará

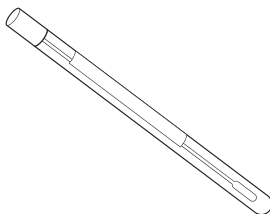

Hisopado rectal

Antes de empezar

- Es útil limpiarse el trasero antes de tomar esta muestra.
- ¿Necesita hacer caca? Vaya ahora y espere un rato antes de recolectar su muestra. Así se asegurará de que su trasero está limpio y su recto vacío.
- Es mejor recolectar la muestra en el cuarto de baño para poder lavarse las manos antes y después.

Consejos útiles


- Escanee este código QR con la cámara de su teléfono móvil para ver videos y consejos que le ayudarán a recolectar su muestra rectal.



Instrucciones

- 1 Lávese las manos.

Desembale el kit sobre una superficie limpia, idealmente en un cuarto de baño.

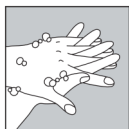


- 2 Retire el hisopo rectal del tubo. **No lo apoye sobre una superficie ni toque la punta.**

- 3 Sujete el hisopo con firmeza, a 1-1.5 pulgadas de la punta.

- 4 Encuentre una posición cómoda. Introduzca la punta del hisopo 1 pulgada dentro del trasero.

- 5 Gire suavemente el hisopo de 5 a 10 veces alrededor de las paredes internas del recto.

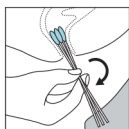

- 6 Gire el hisopo, retirándolo lentamente del recto. Vuelva a introducirlo en el tubo y presione con fuerza para cerrarlo.