


CÓMO RECOLECTAR SU MUESTRA DE ORINA


Qué necesitará

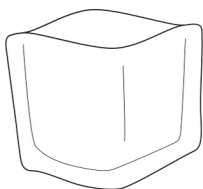

Bolsa



Botella

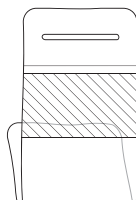


Bolsa de transporte

Antes de empezar

- Antes de recolectar la muestra de orina, no debe haber orinado durante al menos una hora. Si ha orinado recientemente, beber un gran vaso de agua le ayudará a estar preparado para dar una muestra de orina en una hora.
- Lo mejor es recolectar su muestra en el cuarto de baño.

Consejos útiles

- Escanee este código QR con la cámara de su teléfono móvil para ver videos y consejos que le ayudarán a recolectar su muestra de orina.

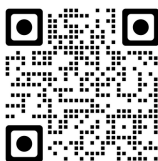

Instrucciones

- 1 Lávese las manos.
Desembale el kit sobre una superficie limpia, idealmente en un cuarto de baño.
- 2 Retire el tapón del frasco de muestras. Colóquelo de pie sobre una superficie cercana.
- 3 Orine en la bolsa de recolección de orina suministrada. **Para obtener mejores resultados, recolecte la primera orina que salga.**
- 4 Vierta cuidadosamente su muestra en la botella, hasta la línea de llenado.
- 5 Presione firmemente hacia abajo para asegurar el tapón.
- 6 Coloque la botella en la bolsa de transporte, doble la parte superior de la bolsa y ciérrela.

