


CÓMO RECOLECTAR SU HISOPADO VAGINAL

Qué necesitará

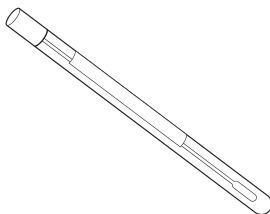

Hisopado vaginal

Antes de empezar

- Tómese su tiempo para sentirse relajada.
- Puede que quiera estar en un cuarto de baño o en cualquier lugar en el que se sienta cómoda.


Consejos útiles

- Escanee este código QR con la cámara de su teléfono móvil para ver videos y consejos para ayudarle a recolectar su muestra vaginal.



Instrucciones

- 1 Lávese las manos.
Desembale el kit sobre una superficie limpia, idealmente en un cuarto de baño.

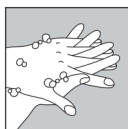


- 2 Extraiga el hisopo vaginal del tubo. **No lo apoye sobre una superficie ni toque la punta.**

- 3 Introduzca suavemente el hisopo a una profundidad de medio dedo en su vagina.



- 4 Gire el hisopo alrededor del interior de su vagina 5-10 veces.

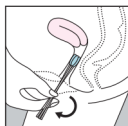

- 5 Vuelva a introducir el hisopo en el tubo y presione con fuerza para sellarlo.